



MERZ AESTHETICS

PELE RENOVADA A PARTIR DE DENTRO  
O EFEITO RADIESSE®

O conteúdo deste folheto destina-se ao médico e foi concebido para facilitar ao médico a comunicação de informações aos doentes

RADIESSE®



# NÃO SERIA FANTÁSTICO SE PUDESSE RENOVAR A PELE A PARTIR DE DENTRO?

Para além do aspeto das linhas de expressão e das rugas, a qualidade da nossa pele muda à medida que envelhecemos. O motivo deve-se ao facto de a pele perder gradualmente dois componentes importantes que lhe conferem força e elasticidade: o colagénio e a elastina.

A consequência traduz-se na desativação das células responsáveis pela renovação da pele (os fibroblastos dérmicos), pelo que esta não se consegue regenerar. É a partir deste momento que começamos a detetar sinais de envelhecimento.<sup>1,2</sup>

**DOENTES E MÉDICOS DE TODO O MUNDO ESTÃO  
A USAR RADIESSE® PARA MELHORAR A QUALIDADE  
DA PELE E CONSEGUIR UM ASPETO COM O QUAL  
“NÃO APARENTA A SUA IDADE”\*.**

Porquê? O RADIESSE® foi concebido especificamente para voltar a fazer com que esse “mecanismo” de “ativação” funcione. O RADIESSE® vai mais além de conferir volume: estimula também a produção natural de colagénio.<sup>3-7</sup>

Ao reativar o processo de renovação da pele, o RADIESSE® pode melhorar a qualidade da mesma e conseguir um aspeto rejuvenescido.

# RADIESSE® REATIVA A PELE A PARTIR DE DENTRO

Ao voltar a colocar o mecanismo em funcionamento, o RADIESSE® reativa os fibroblastos, que, por sua vez, começam a produzir colagénio e elastina novos para fortalecer e regenerar a pele a partir de dentro<sup>3-8</sup>.

## UMA ESTRUTURA NOVA E FORTE

A pele torna a produzir elastina e colagénio de tipo I, o “colagénio da pele jovem”. Este passo é fundamental para conseguir uma pele firme, elástica e forte<sup>4</sup>.

## UM EFEITO INCOMPARÁVEL DE REATIVAÇÃO DOS FIBROBLASTOS

As microesferas de RADIESSE®, feitas de CaHA\* de grande qualidade, potenciam a atividade dos fibroblastos<sup>11</sup>. Com o passar do tempo estas são totalmente absorvidas, restando apenas a pele rejuvenescida<sup>6,12</sup>.

\* Hidroxiapatita de cálcio, uma substância natural



OS RESULTADOS DE RADIESSE® SÃO  
NATURAIS E DURADOUROS: PODEM  
DURAR ATÉ 12 MESES OU MAIS<sup>13,14</sup>.



# RESULTADOS QUE EMBELEZAM A PARTIR DE DENTRO



**MARGARET**

Tratamento com RADIESSE® na linha do maxilar, nas bochechas e nos sulcos nasogenianos

ANTES



DEPOIS – Duas semanas depois da injeção







## DANIELA

Tratamento com RADIESSE® nas  
bochechas.

ANTES

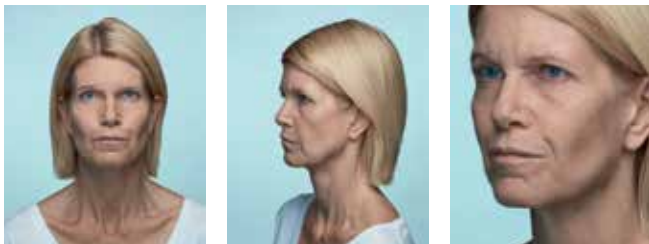


DEPOIS – Duas semanas depois da injeção

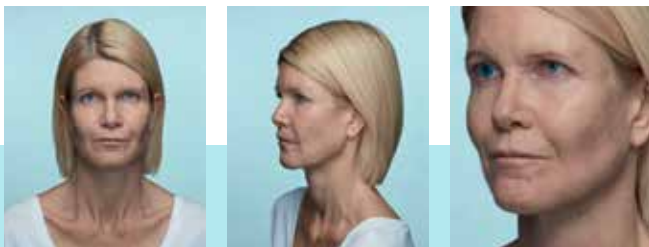


## MARIA

Tratamiento con RADIESSE® en la  
barbilla, la línea de la mandíbula y los  
surcos nasogenianos

ANTES

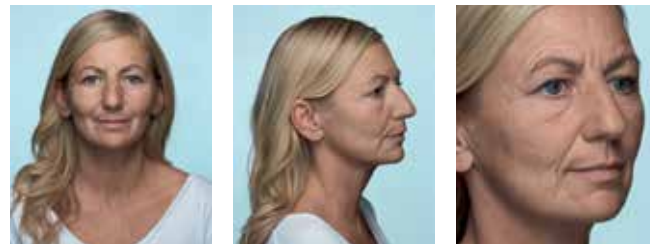

DEPOIS – Duas semanas depois da injeção

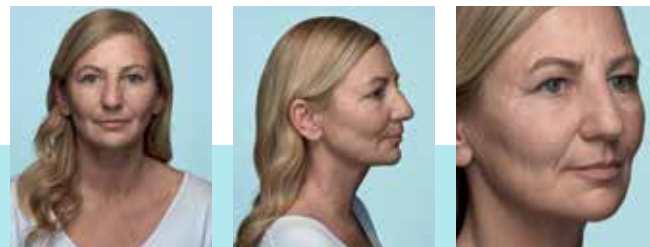

Doentes reais tratadas com RADIESSE®. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa.

# PERGUNTAS FREQUENTES: O ESPECIALISTA RESPONDE

## 1 EM QUE CONSISTE O PROCEDIMENTO?

RADIESSE® é injetado suavemente na pele, normalmente em pequenas quantidades, com uma agulha muito fina. Uma sessão de tratamento demora normalmente cerca de 30 minutos.

## 2 QUANTO TEMPO DEMORA A PELE A APRESENTAR SINAIS DE REJUVENESCIMENTO DEPOIS DO TRATAMENTO COM RADIESSE®?

Geralmente, o efeito é visível imediatamente após a injeção. Ao estimular a produção de colagénio natural do próprio organismo, os benefícios de RADIESSE® mantêm-se ao longo do tempo.

## 3 QUANTO TEMPO DURAM OS EFEITOS DE RADIESSE®?

A duração dos resultados depende da idade, do tipo de pele, do estilo de vida e do metabolismo e, evidentemente, da zona tratada. Os resultados de RADIESSE® costumam ser duradouros, podendo prolongar-se até 12 meses<sup>13,14</sup>.



## 4 TEM EFEITOS SECUNDÁRIOS?

A maioria das reações adversas estão relacionadas com o local de injeção e são, frequentemente, temporárias. Antes do tratamento, o médico informará sobre qualquer possível risco e reação adversa.

## 5 PODE SER USADO EM COMBINAÇÃO COM OUTROS TRATAMENTOS?

A MERZ AESTHETICS oferece uma ampla gama de produtos estéticos. O RADIESSE® pode ser usado em combinação com outros tratamentos faciais. O médico pode recomendar o tratamento personalizado adequado para otimizar os resultados estéticos.

## 6 ONDE POSSO CONSULTAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O RADIESSE®?

É possível obter mais informações sobre o produto, consultando as instruções de utilização do produto.

# QUEM PODE BENEFICIAR COM O EFEITO RADIESSE®?

○ Tem uma pele menos firme e elástica do que costumava ser?

SIM

NÃO

○ Tem uma pele que parece mais frágil e mais fina do que antes?

SIM

NÃO

○ E um cútis sem brilho e irregular que faz com que pareça maior?

SIM

NÃO

○ E linhas de expressão e rugas?

SIM

NÃO

○ Procura um tratamento que atue de forma proativa potenciando as funções naturais de regeneração da pele?

SIM

NÃO

○ Procura uma opção de tratamento com benefícios antienvhecimento duradouros?

SIM

NÃO

○ Procura um aspeto mais jovem e fresco sem qualquer intervenção cirúrgica?

SIM

NÃO

Se a resposta é “Sim” a pelo menos três das perguntas anteriores, o RADIESSE® pode ser uma escolha adequada.



## COMO RENOVAR A PELE A PARTIR DE DENTRO COM RADIESSE®.

RADIESSE® é um preenchimento facial versátil<sup>15,16</sup>, que proporciona:

- Bioestimulação da pele<sup>3-7</sup>
- Rejuvenescimento e melhoria efetivos<sup>15,17</sup>
- Reforço estrutural<sup>13,5,6,18</sup>

**Bibliografia:** 1. Varani J, et al. *Am J Pathol.* 2006 Jun;168(6):1861-8. 2. Fisher GJ, et al. *Arch Dermatol.* 2008 May;144(5):666-72. 3. Yutskovskaya Y, et al. *J Drugs Dermatol.* 2014 Sep;13(9):1047-52. 4. Yutskovskaya YA, Kogan EA. *J Drugs Dermatol.* 2017;16(1):68-74. 5. Berlin AL, et al. *Dermatol Surg.* 2008;34 Suppl 1:S64-7. 6. Marmur ES, et al. *J Cosmet Laser Ther.* 2004;6(4):223-6. 7. Zerbini N. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2018;11:29-35. 8. Zerbini N, et al. *Arch Dermatol Res.* 2017;309(5):389-96. 9. Silvers SL, et al. *Plast Reconstr Surg.* 2006;118(3 Suppl):34S-45S. 10. Casabona G, Pereira G. *Plast Reconstr Surg Glob Open.* 2017;5(7):e1388. 11. Courderot-Masuyer C, et al. *J Cosmet Dermatol.* 2016 Sep;15(3):260-8. 12. Pavicic T. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2015;8:19-25. 13. Tzikas TL. *Dermatol Surg.* 2008;34 Suppl 1:S9-15. 14. Jacovella PF. *Clin Interv Aging.* 2008;3(1):161-74. 15. van Loghem JV, et al. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2015;8(1):38-49. 16. Muti GF, et al. *J Drugs Dermatol.* 2015;14(9):948-54. 17. Sundaram H, et al. *Dermatol Surg.* 2010;36 Suppl 3:1859-65. 18. Moers-Carpi M, et al. *Dermatol Surg.* 2007;33 Suppl 2:S144-51.

Este produto está em conformidade com a legislação em vigor sobre dispositivos médicos. Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização.

RADIESSE® é uma marca registada da Merz North America, Inc.  
 RADIESSE® é um produto fabricado pela Merz North America, Inc.  
 4133 Courtney Road, Suite #10, Franksville, WI 53126 EE. UU.  
 A MERZ AESTHETICS® é uma marca registada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Merz Pharma España S.L.  
 Avenida de Bruselas 5, 28108 Alcobendas - Madrid  
 Serviço de apoio ao cliente: 900 494 474  
 informacion.cliente@merz.com

RADIESSE®